

Priefert[®]

Ranch Equipment

Fixační čelo
model 91



Popis

Žádný jiný produkt vynalezený společností Priefert neměl větší dopad na odvětví skotu než fixační otevírací čelo vynalezeno Marvinem Priefertem v roce 1964. Model 91 Headgate je založen na originálním designu Marvin a je zdaleka nejpopulárnějším hlavním fixačním čelem společnosti Priefert.

HG91 poskytuje bezpečnost jak pro zvířata, tak i pro obsluhu, což pomáhá v práci s dobytkem. Průjezdová hlavice modelu 91 pracuje v manuálním nebo automatickém režimu.

Vlastnosti

- Model 91 Headgate pracuje v ručním nebo automatickém režimu. Funkci automatického zachycení zapnete tím, že posunete páčku automatického uchopení dopředu, abyste aktivovali pružinu.
- V automatickém režimu nastavte páku samočinného uchycení na přední straně čela a vyberte jeden ze čtyř otvorů.
- Boky jsou konturovány tak, aby se bezpečně upevnily kolem krku zvířete.
- Patentovaný systém neomezeného zamykání HG91 je zaručen na dobu životnosti a umožňuje perfektní přizpůsobení pro všechny velikosti zvířat bez nutnosti úprav.
- Fixační čelo je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé. Všechny páky a držadla jsou umístěny tak, že jediný operátor může obsluhovat fixační čelo z jednoho místa s minimálním úsilím.
- Čelo je přizpůsobené pro levý nebo pravotočivý provoz.
- Řetěz opěrky lze snadno upevnit kolem hlavy zvířete, aby byl zajištěn snadný přístup pro lékaře nebo čtení ušních štítků / tetování.
- 5 let omezená záruka na zpracování a materiály.

Nastavení automatického provozu

1. Automatickou páku (2) zaseknout do zářezu plechu obslužné páky. Tím se napne pružina (6) při otevření krční fixace.
2. Krční fixaci otevřít obslužnou pákou a pomocí distančního držáku (1) nastavit požadovanou šířku krku.
3. Zvíře se samo zachytne, protože distanční držák (1) při tlaku zvířete na madlo krční fixace bude odlehčený, a pomocí gravitační síly se překlopí dolů. Pomocí napnutí pružiny (6) budou madla na krční fixaci těsně přitlačena na krk zvířete. Zvíře nemůže samo krční fixaci otevřít, neboť tomu zabrání svěrací zámky.
4. Zvíře můžete jednoduše propustit pomocí obslužné páky (4) vpřed.

Nastavení manuálního provozu

1. Automatickou páku (2) zvednout nahoru, aby nebyla zaseklá v zářezu u plechu u obslužné páky.
2. Krční fixaci lze otevřít obslužnou pákou (4).
3. Jakmile se hlava zvířete dostane do chytacího madla krční fixace, uzavřete krční fixaci obslužnou pákou (4).
4. Poté, co jste zvíře ošetřili, můžete ho jednoduše pomocí obslužné páky propustit vpřed.

Přestavba obslužné páky na druhou stranu je možná. Musí k tomu být přebudovány – obslužná páka (4), automatická páka (5) a pružina (6).



Fixační čelo Priefert



- 1) Distanční držák pro nastavení šířky krku s automatickým chodem
- 2) Automatická páka
- 3) Lišta se svěracím zámkem (nutno mazat olejem)
- 4) Obslužná páka
- 5) Řetězový zářez – zde se zavěsí řetěz pro fixaci hlavy
- 6) Pružina pro automatický provoz
- 7) Otvory pro uchycení fixačního čela 25mm.
- 8) Průvlek řetězu pro fixaci hlavy. Užší spony zabraňují vyvlečení řetězu směrem nahoru a zabraňuje zranění zvířete na nozdách.
- 9) Průvlek řetězu pro fixaci hlavy. Užší spony zabraňují vyvlečení řetězu směrem nahoru a zabraňuje zranění zvířete na nozdách.

Použití řetězu při fixaci hlavy



**PRŮVLEK ŘETĚZU PRO
FIXACI HLAVY (9)**

**ZÁSEK PRO UCHYCENÍ
ŘETĚZU**

**ZÁSEK PRO UVOLNĚNÍ
ŘETĚZU**

POZOR

Uvolněte vždy nejdříve řetěz na řetězovém záseku (5) na pravém rámu fixačního čela, jinak hrozí nebezpečí přeskřípnutí rukou.